

CYTOPLAST®

7 & 8
januari
5^e editie!

10 & 11
juni
6^e editie!



Hands-on workshop

Bereik nieuwe hoogten in botregeneratie door deelname aan een van de hands-on workshops in Leeuwarden (Goutum).

Referenten: Melle Vroom (MSc), Lodewijk Gründemann (MSc), Parodontologen (NVvP)/Implantologen (NVOI), Parodontologie Praktijk Friesland.



Klinisch beeld voor GBR.
Smalle processus is waarneembaar



6 maanden later wordt de Cytoplast-Titanium membraan verwijderd



Het plaatsen van 2 implantaten is nu goed mogelijk

Memodent. Toegewijd aan zekerheid



Memodent

Bereik nieuwe hoogten met de CYTOPLAST d-PTFE membranen

Wat zijn de unieke aspecten van de CYTOPLAST d-PTFE membranen?

Osteogenics heeft de Cytoplast d-PTFE membranen ontwikkeld om de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van de niet-resorbeerbare membranen te verhogen. Bekende nadelen van de Gore-Tex® e-PTFE membranen (early exposure en zacht weefselingroei) behoren door het zeer verdichte d-PTFE oppervlak tot het verleden. De Cytoplast d-PTFE membranen zijn bacteriedicht en kunnen in de mondholte gedeeltelijk bloot liggen. Dit is vooral een voordeel bij het augmenteren van grotere horizontale en/of verticale defecten waarbij primaire sluiting soms lastig te behouden is. Door het high-density oppervlak kan het zachte weefsel niet in het membraan vastgroeien. Hierdoor is Cytoplast zeer eenvoudig te verwijderen.

Meer informatie
over de producten
van Cytoplast:
memodent.nl of
osteogenics.com

Uw voordelen

- 100% bacteriedichte barrière
- Bij expositie en blootliggend Cytoplast membraan is augmentatie niet mislukt
- Makkelijk te verwijderen
- Wetenschappelijk bewezen
- Voorspelbaar, veilig en eenvoudig
- Kosten efficiënt

Toepassingsgebieden

- Horizontaal en/of verticaal augmenteren (Cytoplast membranen met titanium versteviging)
- Enkel- of meerwandige defecten afdekken en eventueel door een titanium structuur actief te ondersteunen
- Botaugmentatie in combinatie met directe implantaatplaatsing
- Socket preservation: na extractie socket afdekken met Cytoplast membraan


Reconstructie via de CYTOPLAST Ti250 d-PTFE membranen en allograft

Casussen en fotografie: Parodontologie Praktijk Friesland

Case 1



1. Kaaksituatie voor het uitvoeren van een botaugmentatie met een titanium verstevigd d-PTFE Cytoplast membraan en het aanbrengen van botsubstituut.

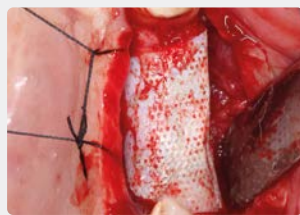

2. Na een probleemloze genezing van 6 maanden wordt het membraan verwijderd. Klinisch beeld na het openen van de weefsels.



3. Door een goede processus verbreding is het plaatsen van twee implantaten mogelijk.



Case 2



1. CB-CT beeld van de 36. De pijl geeft de forse hoeveelheid botverlies aan de vestibulaire zijde



2. Het gebied 36 direct na verwijdering van het element. Aan de vestibulaire zijde is veel botverlies waarneembaar



3. Vijf weken na verwijdering van de 36. Het weefsel oogt rustig en de titanium versteviging in het d-PTFE membraan is zichtbaar



4. Klinisch beeld 36 voorafgaand aan plaatsing van implantaat

Hands-on Workshop

januari 2022 editie

Spreker

- Melle Vroom
- Lodewijk Gründemann

Datum

7 januari 2022

8 januari 2022

Tijdstip

7 januari: 8:45 - 16.30 uur

8 januari: 8:45 - 12.30 uur

Locatie

Parodontologie Praktijk
Friesland , Goutum
Leeuwarden

Kosten

€ 1400,- (incl. BTW)

Inclusief lunch en

diner, exclusief

hotelovernachting.



Melle Vroom (MSc)

- Parodontoloog (NVvP)/
Implantoloog (NVOI)
- Parodontologie Praktijk Friesland
te Leeuwarden/ Goutum
- Ruime ervaring met Cytoplast:
300+ casussen binnen de praktijk



Lodewijk Gründemann (MSc)

- Parodontoloog (NVvP)/
Implantoloog (NVOI)
- Parodontologie Praktijk Friesland
te Leeuwarden / Goutum
- Ruime ervaring met Cytoplast:
300+ casussen binnen de praktijk

Scan de
QR-code
voor
aanmelding

Hands-on Workshop

juni 2022 editie

Sprekers

- Melle Vroom
- Lodewijk Gründemann

Datum

10 juni 2022

11 juni 2022

Tijdstip

10 juni: 8:45 - 16.30 uur

11 juni: 8:45 - 12.30 uur

Locatie

Parodontologie Praktijk
Friesland , Goutum
Leeuwarden

Kosten

€ 1400,- (incl. BTW)

Inclusief lunch en

diner, exclusief

hotelovernachting.

Inhoud hands-on workshop*

- Introductie Cytoplast
- Praktische richtlijnen voor het werken met Cytoplast
- Casusbesprekingen
- Complicatie management
- Hands-on training met Cytoplast op varkensskaken
- Technieken voor soft tissue handling
- Video-analyses van eerdere casussen

* Het maximaal aantal deelnemers is 15. Voor deelname aan de Hands-on Workshop is het ten eerste aanbevolen om eerst de klinische avond te hebben bezocht. Derhalve krijgen deelnemers van de voorgaande klinische avonden voorrang bij inschrijving voor de Hands-on Workshops.



Inschrijven of vragen

Voor inschrijvingen of vragen over deze klinische avond of hands-on workshop kunt u contact opnemen met drs. Lorentz Domburg van Memodent; tel. **053- 4306663** of via info@memodent.nl

Ook kunt u altijd voor aanvullende informatie over de producten van Cytoplast onze website bezoeken:

www.memodent.nl of www.osteogenics.com

CYTOPLAST®

Cytoplast™ titanium-versterkte membranen

Het traditionele frame design, waarin op strategische plekken ondersteuning wordt geboden aan de delicate weefsels, heeft meer dan 25 jaar klinische voorgeschiedenis en succesvolle toepassing binnen de GBR.

- Minder is meer - minder titaniummassa maakt een grotere veelzijdigheid in vormgeving en plaatsing mogelijk
- Het dunne, lichtgewicht frame is eenvoudig te knippen en is biocompatibel met de bovenliggende zachte weefsels
- Het 'grade 1' titanium frame is eenvoudig in 3 dimensies buigbaar en behoudt zijn vorm



Weergegeven op ware grootte

Eigenschappen en voordelen

- Kan worden verbogen en gevormd voor ruimtebehoud en tenting techniek
- Kan in de gewenste vorm worden geknipt
- Het dichte PTFE voorkomt weefselsingroei waardoor de verwijdering van het membraan eenvoudiger gaat dan dat van een titanium mesh

Overige Osteogenics producten:

CYTOPLAST®

PTFE SUTURE

the soft monofilament

- Het ideale hecht draad voor implantaat- en botopbouwprocedures
- Monofilament voorkomt penetratie van bacteriën tot op de chirurgische opbouw
- **Zacht** hecht draad. Comfortabel voor de patiënt

MEMODENT B.V

Johan van Hoornstraat 3 | 7541 BB Enschede, Nederland

T +31 (0) 53 430 66 63 | F +31 (0) 53 430 04 34

E info@memodent.nl | W www.memodent.nl



Memodent